



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

**İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KLİNİK DİŞİ MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI ENDOTOKSİN
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ**

Adres Kozağaç Mah.Özmen Cad. No:147/4 Buca/İZMİR
Tel: (0232) 224 12 12 Faks: (0232) 224 59 89

Kod No: NKK:02/KDML

Yayın Tarihi: 01.07.2024

Revizyon Tarihi/ No:

Sayfa No: 1/1

NUMUNENİN ALINIŞ ŞEKLİ:

- Laboratuvara getirilen numune, asıl numuneyi temsil etmelidir.
- Endotoksin analizi için alınacak su numuneleri, steril 100 ml.lik, endotoksinden arındırılmış şişeye doldurulmalıdır.
- Bu şişeler, analiz ücreti ödendiğinde Numune Kabul Biriminden temin edilmelidir.
- Numuneyi alan kişinin elleri temiz olmalıdır.
- Şişeye su ağzına kadar doldurulmamalıdır.

1. Bir çeşmeden alınıyorsa, çeşmenin musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve yakılır. Çeşmeden 1–2 dakika kadar tazyikli su akıtılır. Sonra doğrudan doğruya endotoksinden arıtılmış şişe ucundan tutularak açılır,şişe alttan tutularak ağzı yeniden alevden geçirilir. Su numunesi şişenin dışına taşmasına izin verilmeden musluk biraz kısılarak özenle alınmalıdır.

2. Şişenin ağzına veya kapağa el veya başka bir şey değdirilmemelidir.

3. Suyu doldururken suyun el veya parmaklar üzerinden süzülerek şişeye dökülmemesi için şişeler sadece dip tarafından tutulmalıdır.

5. Şişenin kirlendiğine dair en ufak bir şüphe varsa yeni şişe kullanılır.

6. Şişelerin üzerine birer etiket yapıştırılarak örnek suyun sistemin neresinden alındığı, alınış tarihi,hemodiyalizde kullanılacak suyun hangi sistemle elde edildiği (Ro, deiyonize vb.) belirtilmelidir.

NUMUNENİN GETİRİLİŞ ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Numuneler soğuk zincirle (Buz kaplarının arasında olmalı) +4°C ' de taşınmalıdır.

Analiz sonuçlarının güvenilirliği açısından numuneler en fazla 6 saat içinde laboratuvara teslim edilmelidir.

NUMUNENİN AMBALAJI, MİKTARLARI VE ANALİZ SÜRELERİ:

Numunenin analiz süresi max 48 saattir.

ELEKTRONİK NÜSHA BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



Sayfa No: 1/1

[illegible]